

OTORIG®

NOSNÝ SPREJ

**Efektívna terapia
nosní sliznice**

s



OZOILE®
Unikátny patent
Stabilní Ozonidy

Otorig® nosný sprej je zdravotníckym prostriedkom k uvoľneniu, ochrane, redukcii mikróbov a čisteniu nosných dutín. Je určený na prevenciu a podporu liečby akútnej i chronickej afekcie nosohltanu, pri podráždení, otoku, svēdení, pálení, nadmernej tvorbe hľenu. Otorig® vytvára ochranný mukoadhezívny lipidový film a napomáha k obnoveniu optimálneho stavu nosnej sliznice.

HLAVNÉ SLOŽKY

Ozoile® (stabilní Ozonidy), Voda (Ozonizovaná), Mentol, Chlorid sodný.

OZOILE®

Pôsobí na podráždenú a svēdivú tkáň, ktoré dodáva kyslík a vytvára prostredie, ktoré zabraňuje zmenám mikrobioty sliznice. Pôsobí proti zarudnutiu, svēdeniu, pálení, otoku, deskvacii a proti rozvoju degeneratívnych procesov.

MENTOL

Osvēžujúci, analgetický a uľavujúci efekt.

CHLORID SODNÝ

Jeho prítomnosť v roztoku podporuje osmózu vody z prekrvenej sliznice a tým uvoľňuje hlien a usnadňuje jeho odstránenie.

JAK FUNGUJE

Otorig® nosný sprej s Ozoile® je ochranný, dekongesciálny a antimikrobiálny zdravotníckym prostriedkom pre nosnú sliznicu, špeciálne určený na prevenciu a liečbu akútnej i chronickej nasofaryngeálnej afekcie, charakterizovaných podráždením, otokom, svēdením, pálením, nadmernou tvorbou hľenu. Inovatívny zloženie, ktoré pomáha v prípade chřipkového syndrómu spôsobeného nachlazením, alergiami alebo látkami ve znečistenom životnom prostredí a také pred a po chirurgických zákrokoch v oblasti ORL. Otorig® nosný sprej uvoľňuje nosné cesty, znižuje zdurení sliznice a reguluje sekréciu pomocí osmotické výměny, uvoľňuje hlien a usnadňuje jeho odstránenie. Jeho zloženie s Ozoile® udržuje sliznicu dobre hydratovanú a má dôležitý antimikrobiálny a ochranný účinok.


Vytvára mukoadhezívny lipidový film, ktorý chráni sliznicu pred negatívnymi zmenami mikrobioty, čímž zlepšuje stav nosných dutín.

JAK POUŽÍVAŤ

1) Odstráňte priehľadný ochranný kryt (a) a rozprašovač (b) ťahom nahoru.

2) Nasadte dávkovač nosného spreja (c) na píšť.

Aplikujte Otorig® nosný sprej dle potreby 1 alebo 2 vstřiky do každé nosní dírky, jemně se vysmrkejte a poté opakujte aplikaci znovu.

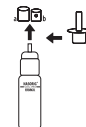

Doporučujeme prípravok používať viackrát během dne, můžete i s krátkým časovým r zastupem.

Před spaním opakujte aplikaci. Dávkovač po každém použití opláchněte p roudem horké vody a zakryte ochranným viečkom. Pretože se jedná o přírodní produkt a jeho farmakologický mechanismus účinku není návykový, lze Otorig používat často a dlouhodobě.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte po vypršení expirace. Nepoužívejte je-li obal poškodený. Vyhněte se kontaktu s očima, v prípade náhodného vniknutiu, dôkladne opláchněte vodou. Případy precitlivosti nebo vedlejších účinků nejsou známy, pokud se však objeví, nepoužívejte a poradte se s lékařem. Před použitím zdravotnického prostředku si důkladně umyjte ruce. Po použití lahvičku řádně uzavřete. Přípravok uchovávejte na suchém místě mimo zdroje tepla a slunečního záření. Datum expirace se vztahuje na nedotčený a dokonale uchovaný prípravok. Po otvorení spotřebujte do 6 mesíců.

BALENÍ

Lahvička 20 ml.



BEZ LEPKU
BEZ ALERGENŮ
BEZ BARVIV

Zdravotníckym prostriedkom.
Výhradní distributor pro ČR a SR
EMPOLAS s.r.o., Česká republika
info@empolas.com
www.ozonidy.cz

Erbagil s.r.l. - Via L. Settembrini, 13

Telese Terme (Bn) - Italy

www.erbagil.com - info@erbagil.com

OTORIG®

NOSOVÝ SPREJ

**Efektívna terapia
nosovej sliznice**

s



OZOILE®
Unikátny patent
Stabilní Ozonidy

Otorig® nosový sprej je zdravotníckym pomôckou k uvoľneniu, ochrane, redukcii mikróbov a čisteniu nosových dutín. Je určený na prevenciu a podporu liečby akútnej i chronickej afekcie nosohltanu, pri podráždení, opuchu, svrbení, pálení, nadmernej tvorbe hľenu. Otorig® vytvára ochranný mukoadhezívny lipidový film a napomáha k obnoveniu optimálneho stavu nosovej sliznice.

HLAVNÉ SLOŽKY

Ozoile® (stabilní ozonidy), Aqua (ozonizovaná voda), Mentol, Chlorid sodný.

OZOILE®

Pôsobí na podráždenú a svrbivé tkanivo, ktorému dodáva kyslík a vytvára prostredie, ktoré zabraňuje zmenám mikrobioty sliznice. Pôsobí proti začervneniu, svrbeniu, páleniu, opuchu, deskvacii a proti rozvoju degeneratívnych procesov.

MENTOL

Osvēžujúci, analgetický a uľavujúci efekt.

CHLORID SODNÝ

Jeho prítomnosť v roztoku podporuje osmózu vody z prekrvenej sliznice a tým uvoľňuje hlien a uľahčuje jeho odstránenie.

AKO FUNGUJE

Otorig® nosový sprej s Ozoile® je ochranná, dekongesciálna a antimikrobiálna zdravotníckym pomôckou pre nosovú sliznicu, špeciálne určená na prevenciu a liečbu akútnej i chronickej nasofaryngeálnej afekcie, charakterizovaných podráždením, opuchom, svrbením, pálením, nadmernou tvorbou hľenu. Inovatívny zloženie, ktoré pomáha v prípade chřipkového syndrómu spôsobeného prechladnutím, alergiami alebo látkami v znečistenom životnom prostredí a tiež pred a po chirurgických zákrokoch v oblasti ORL. Otorig® nosový sprej uvoľňuje nosové cesty, znižuje zdurení sliznice a reguluje sekréciu pomocí osmotické výměny, uvoľňuje hlien a uľahčuje jeho odstránenie. Jeho zloženie s Ozoile® udržuje sliznicu dobre hydratovanú a má dôležitý antimikrobiálny a ochranný účinok. Vytvára mukoadhezívny lipidový film, ktorý chráni sliznicu pred negatívnymi zmenami mikrobioty,

čím zlepšuje stav nosových dutín.

AKO POUŽÍVAŤ

1) Odstráňte priehľadný ochranný kryt (a) a rozprašovač (b) ťahom nahoru.

2) Nasadte dávkovač nosového spreja (c) na píšť.

Aplikujte Otorig® nosový sprej podľa potreby 1 alebo 2 vstřiky do každé nosovej dírky, jemne sa vysmrkejte a potom opakujte aplikáciu znovu.



Doporučame prípravok používať viackrát počas dňa, môžete aj s krátkym časovým rozostupom.


Před spaním opakujte aplikáciu. Dávkovač po každom použití opláchnite prúdom horúcej vody a zakryte ochranným viečkom. Pretože sa jedná o prírodní produkt a jeho farmakologický mechanismus účinku nie je návykový, je možné Otorig používať často a dlhodobo.

VAROVANIE A UPOZORNENIE

Uchovávejte mimo dosahu dětí. Nepoužívejte po vypršení expirácie. Nepoužívejte, ak je obal poškodený. Vyhněte sa kontaktu s očami, v prípade náhodného vniknutiu, dôkladne opláchnite vodou. Případy precitlivosti alebo vedľajších účinkov nie sú známe, pokiaľ sa však objavia, prípravok ďalej nepoužívejte a poradte sa s lekárom. Před použitím zdravotníckej pomôcky si dôkladne umyte ruky. Po použití flaštičku riadne uzavřete. Přípravok uchovávejte na suchom mieste mimo zdrojov tepla a slnečného žiarenia. Dátum expirácie sa vztahuje na nedotknutý a dokonale uchovaný prípravok. Po otvorení spotřebujte do 6 mesiacov.

BALENIE

Flaštička 20 ml

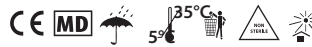

BEZ LEPKU
BEZ ALERGENŮ
BEZ FARBIV

Zdravotníckym pomôckou.
Výhradní distributor pre ČR a SR
EMPOLAS s.r.o., Česká republika
info@empolas.com
www.ozonidy.sk

Erbagil s.r.l. - Via L. Settembrini, 13
Telese Terme (Bn) - Italy
www.erbagil.com - info@erbagil.com