

RIGENOMA®

SPREJ

Efektivní terapie a čištění poraněné a zanícené kůže



OZOILE

UNIKÁTNÍ PATENT

Stabilní Ozonidy

INDIKACE

RIGENOMA® SPREJ s OzoilE® je určen k prevenci a léčbě akutních a chronických kožních lézí různé etiologie. Také v případech s rizikem infekce, jako jsou proleženiny (z cévní nebo metabolické příčiny), traumatické a chirurgické rány, v případě poškození kůže po chemoterapii a ozařování a na jiné dermatologické patologie a mykózy.

HLAVNÍ SLOŽKY:

OzoilE® (stabilní Ozonidy s vitaminem E acetátem), Melaleuca Alternifolia (Tea Tree Oil), kyselina thioktová.

OzoilE® (stabilní Ozonidy s vitaminem E acetátem) je skupina inovativních molekul získaných patentovaným procesem; má protizánětlivé účinky, působí proti svědění a hypoxii, vytváří nepříznivé prostředí pro patogenní mikrobiální proliferaci a podporuje procesy na obnovu tkání.

JAK POUŽÍVAT

Nastříkejte přípravek přímo na postiženou oblast. Při ošetření akutních a chronických lézí různé etiologie, po očištění RIGENOMA® čistícím roztokem, aplikujte sprej RIGENOMA® na spodinu léze, jeden střík na 4 cm² ze vzdálenosti přibližně 5 cm. Následně se doporučuje nanést homogenní vrstvu RIGENOMA® krému na kůži v okolí rány cca 5 cm. Lézi přikryjte gázou Rigenoma®, která udržuje vlhké prostředí, podporuje obnovu a regeneraci tkáně až na spodinu rány. Aplikujte Rigenoma® sprej jednou nebo dvakrát denně. V případě obvazu nebo okluzivního obvazu aplikujte každé 3 nebo 4 dny při výměně krytí dle doporučení lékaře. Při léčbě

povrchových kožních potíží aplikujte Rigenoma® sprej 2x až 3x denně. Doba léčby je závislá na velikosti léze a rychlosti terapeutické odpovědi organismu.

UPOZORNĚNÍ

Lokální použití. Nepožívejte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený a v případě vypršení data expirace. Datum expirace se vztahuje na neporušený a správně skladovaný produkt. Uchovávejte v chladu, na suchém místě, mimo zdroje tepla a přímého slunečního záření. Skladujte nejlépe mezi 5°C a 35°C. Před použitím si dobře umyjte ruce. Po použití pečlivě sprej uzavřete. Po otevření se doporučuje výrobek spotřebovat do 6 měsíců.

KONTRAINDIKACE

Sprej Rigenoma® je dobře snášen. Nepoužívejte v případě zjištění přecitlivělosti na některé složky přípravku. Nejsou známy žádné případy senzibilizace nebo vedlejších nežádoucích projevů. Pokud k nim dojde, přestaňte přípravek používat a poradte se se svým lékařem. Nejsou známy žádné případy předávkování. Nejsou žádné známé interakce s léky a léčivými látkami.

BALENÍ

Lahvička 20 ml.

BEZ LEPKU
BEZ ALERGENŮ
BEZ BARVIV
BEZ KONZERVANTŮ

Zdravotnický prostředek


Výhradní distributor pro ČR a SR:
EMPOLAS s.r.o.
Ceská republika
info@empolas.com www.ozonidy.cz


ERBAGIL s.r.l.
Via L. Settembrini, 13
82037 Telesse Terme (BN) Italy
www.erbagil.com

REV. 02 11/2022



RIGENOMA®

SPREJ

Efektívna terapia a čistenie poranenej a zapálenej kože



OZOILE
UNIKÁTNY PATENT
Stabilné Ozonidy

INDIKÁCIE

RIGENOMA® SPREJ s OzoilE® je určený na prevenciu a liečbu akútnych a chronických kožných lézií rôznej etiológie. Tiež v prípadoch s rizikom infekcie, ako sú preležaniny (z cievnej alebo metabolickej príčiny), traumatické a chirurgické rany, v prípade poškodenia kože po chemoterapii a ožarovaní a na iné dermatologické patológie a mykózy.

HLAVNÉ ZLOŽKY:

OzoilE® (stabilné Ozonidy s acetátom vitamínu E), Melaleuca Alternifolia (Tea Tree Oil), kyselina tioktová.

OzoilE® (stabilné Ozonidy s acetátom vitamínu E), je skupina inovatívnych molekúl získaných patentovaným procesom; má protizápalové účinky, pôsobí proti svrbeniu, proti hypoxii a vytvára nepriaznivé prostredie pre patogénnu mikrobiálnu proliferáciu a podporuje procesy na obnovu tkanív.

AKO POUŽÍVAŤ

Nastriekajte prípravok priamo na postihnutú oblasť. Pri ošetrení akútnych a chronických lézií rôznej etiológie, po očistení Rigenoma® čistiacim roztokom, aplikujte sprej Rigenoma® na spodinu lézie, jeden strek na 4 cm² zo vzdialenosti približne 5 cm. Následne sa odporúča naniesť homogénnu vrstvu Rigenoma® krému na kožu v okolí rany cca 5 cm. Léziu prekryte gázou Rigenoma®, ktorá udržuje vlhké prostredie, podporuje obnovu a regeneráciu tkaniva až na spodinu rany. Aplikujte Rigenoma® sprej raz alebo dvakrát denne. V prípade obväzu alebo okluzívneho obväzu aplikujte každé 3

alebo 4 dni pri výmene krytia podľa odporúčania lekára. Pri liečbe povrchových kožných ťažkostí aplikujte Rigenoma® sprej 2x až 3x denne. Doba liečby je závislá na veľkosti a závažnosti lézie a rýchlosti terapeuticko-odpovede organizmu.

UPOZORNĚNÍ

Lokálna aplikácia. Nepožívajete. Uchovávať mimo dosahu detí. Nepoužívajte, ak je obal poškodený a po uplynutí doby použiteľnosti. Dátum expirácie sa vzťahuje na neporušený a správne skladovaný produkt. Pred nanášaním si dobre umyte ruky. Po aplikácii sprej starostlivo uzatvorte a skladujte v neporušenom obale na chladnom a suchom mieste mimo zdroja tepla a priame slnečné žiarenie. Uchovávať najlepšie medzi 5 °C a 35 °C. Po otvorení spotrebujte do 6 mesiacov.

KONTRAINDIKÁCIE

Sprej Rigenoma® je dobre znášaný. Nepoužívajte v prípade zistenia precitlivenosti na niektoré zložky prípravku. Nie sú známe žiadne prípady vedľajších účinkov. V prípade, že dôjde k nežiadúcim reakciám, prestane krém používať a poradte sa so svojím lekárom. Nie sú známe žiadne prípady predávkovania. Nie sú známe žiadne interakcie s liekmi a inými liečivými látkami.

BALENIE

Fľaštička 20 ml.

BEZ LEPKU
BEZ ALERGÉNOV
BEZ FARBIV
BEZ KONZERVANTOV

Zdravotnícka pomôcka


Výhradný distribútor pre ČR a SR:
EMPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@empolas.com www.ozonidy.sk


ERBAGIL s.r.l.
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com

REV. 02 11/2022

