

# RIGENOMA®

## ALGINÁTOVÉ KRYTÍ

**Adsorbční krytí z alginátu s unikátní patentovanou složkou**  
**OzoilE® pro léčbu kožních lézí.**



RIGENOMA® alginátové krytí je sterilní krytí na secernující rány složené z přírodních vápenatých alginátových vláken v kombinaci s OzoilE®, které podporuje tvorbu granulační tkáně a vytváří nepříznivé prostředí pro mikrobiální proliferaci. RIGENOMA® alginátové krytí je baleno v ochranném blistru a sterilně zataveno. Konečný produkt je sterilizován beta paprsky. Zvláštní textura/vazba alginátových vláken zajišťuje vynikající savost a odolnost vůči tekutinám a umožňuje jednoduché, atraumatické odstranění jediným úkonem, bez zanechání zbytků. Gel tvořený alginátem zajišťuje vynikající kontrolu exsudátu bez macerace kůže v okraji a okolí rány. Kombinace s OzoilE® podporuje tvorbu granulační tkáně a vytváří prostředí nepříznivé pro mikrobiální proliferaci.

### HLAVNÍ SLOŽKY:

Alginát vápenatý, OzoilE® (stabilní Ozonidy s vitamínem E acetátem).

### INDIKACE

RIGENOMA® alginátové krytí je sterilní krytí určené pro lokální léčbu akutních a chronických ran různé etiologie, od středně až po vysoce secernující povrchové a hluboké rány, jako jsou chirurgické, traumatické rány, cévní poranění, dekubity, diabetické nohy, onkologické a radioterapií vyvolané rány atd. RIGENOMA® alginátové krytí podporuje primární homeostázu a může kontrolovat drobné krvácení u povrchových a hlubokých ran.

RIGENOMA® alginátové krytí je indikováno k léčbě infikovaných ran pod lékařským dohledem.

### JAK POUŽÍVAT

Po očištění rány a vysušení jejích okrajů sterilní gázou aplikujte RIGENOMA® alginátové krytí přímo na spodinu rány,

u povrchových ran nepřekrývejte výrazně okraje rány a u hlubokých ran vyplňte celou spodinu rány.

RIGENOMA® alginátové krytí se tvorbou gelu přizpůsobuje stěnám hluboké rány.

Překryjte nepřilnavým sekundárním obvazem jako např. RIGENOMA® gázou a zajistěte ochranným obvazem.

RIGENOMA® alginátové krytí lze vyměňovat dvakrát až třikrát týdně v závislosti na množství tvořícího se exsudátu, je-li obvaz nasycen gelem.

### UPOZORNĚNÍ

Pro vnější použití. Nepožívejte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte, je-li obal poškozený nebo po uplynutí data expirace. Datum spotřeby se vztahuje na neporušený a správně uskladněný produkt. Uchovávejte na chladném a suchém místě, mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Skladujte nejlépe mezi 5 °C a 35 °C. Před použitím zdravotnického prostředku si dobře umyjte ruce. Jednotlivé sterilní balení je určeno pouze na jedno použití pro jednoho pacienta. Opakované použití může způsobit vážné infekce.

### KONTRAINDIKACE

RIGENOMA® alginátové krytí je dobře snášeno. Nejsou známy žádné případy vedlejších účinků či alergických reakcí. Nepoužívejte v případě zjištěné precitlivlosti na přípravek nebo jeho složky. Pokud se projeví, přestaňte přípravek používat a obraťte se na svého lékaře. Nejsou známy žádné kontraindikace a vedlejší účinky v období těhotenství a kojení, před aplikací se poraďte se svým lékařem.

### BALENÍ

5x krytí 10 cm x 10 cm

BEZ LEPKU  
BEZ BARVIV  
BEZ ALERGENŮ

  
Výhradní distributor pro ČR a SR:  
EMPOLAS s.r.o.  
Česká republika  
info@empolas.com www.ozonidy.cz

 **ERBAGIL s.r.l**  
Via L. Settembrini, 13  
82037 Telesse Terme (BN) Italy  
www.erbagil.com

REV. 01 01/2023



# RIGENOMA®

## ALGINÁTOVÉ KRYTIE

**Adsorbčné krytie z alginátu  
s unikátnou patentovanou zložkou  
OzoilE® na liečbu kožných lézií.**



**OZOILE**  
UNIKÁTNY PATENT  
Stabilné Ozonidy

RIGENOMA® alginátové krytie je sterilné krytie na secernujúce rany zložené z prírodných vápenatých alginátových vlákien v kombinácii s OzoilE®, ktoré podporuje tvorbu granulačného tkaniva a vytvára nepriaznivé prostredie pre mikrobiálnu proliferáciu. RIGENOMA® alginátové krytie je balené v ochrannom blistri a sterilne zatavené. Konečný produkt je sterilizovaný beta lúčmi. Zvláštna textúra/väzba alginátových vlákien zaisťuje vynikajúcu savosť a odolnosť voči tekutinám a umožňuje jednoduché, a traumatické odstránenie jediným úkonom, bez zanechania zvyškov. Gél tvorený alginátom zaisťuje vynikajúcu kontrolu exsudátu bez macerácie kože v okraji a okolí rany. Kombinácia s OzoilE® podporuje tvorbu granulačného tkaniva a vytvára prostredie nepriaznivé pre mikrobiálnu proliferáciu.

### HLAVNÉ ZLOŽKY:

Alginát vápenatý, OzoilE® (stabilné Ozonidy s vitamínom E acetátom).

### INDIKÁCIE

RIGENOMA® alginátové krytie je sterilné krytie určené na lokálnu liečbu akútnych a chronických rán rôznej etiológie, od stredne až po vysoko secernujúce povrchové a hlboké rany, ako sú chirurgické, traumatické rany, cievne poranenia, dekubity, diabetické nohy, onkologické a rádioterapiou vyvolané rany. RIGENOMA® alginátové krytie podporuje primárnu homeostázu a môže kontrolovať drobné krvácanie u povrchových a hlbokých rán.

RIGENOMA® alginátové krytie je indikované na liečbu infikovaných rán pod lekársym dohľadom.

### AKO POUŽÍVAŤ

Po očistení rany a vysušení jej okrajov sterilnou gázou

aplikujte RIGENOMA® alginátové krytie priamo na spodinu rany, pri povrchových ranách neprekrývajte výrazne okraje rany a pri hlbokých ranách vyplňte celú spodinu rany. RIGENOMA® alginátové krytie sa tvorbou gélu prispôsobuje stenám hlbokoj rany. Prekryte neprilnavým sekundárnym obvázom ako napr. RIGENOMA® gázou a zaisťte ochranným obvázom. RIGENOMA® alginátové krytie je možné vymieňať dvakrát až trikrát týždenne v závislosti od množstva tvoriaceho sa exsudátu, ak je obváz nasýtený gélom.

### UPOZORNENIE

Na vonkajšie použitie. Nepožívajte. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte, ak je obal poškodený alebo po uplynutí dátumu expirácie. Dátum spotreby sa vzťahuje na neporušený a správne uskladnený produkt. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia. Skladujte najlepšie medzi 5 °C a 35 °C. Pred použitím zdravotníckej pomôcky si dobre umyte ruky. Jednotlivé sterilné balenie je určené iba na jedno použitie pre jedného pacienta. Opakované použitie môže spôsobiť vážne infekcie.

### KONTRAINDIKÁCIE

RIGENOMA® alginátové krytie je dobre znášaný. Nie sú známe žiadne prípady vedľajších účinkov či alergických reakcií. Nepoužívajte v prípade zistenej precitlivenosti na prípravok alebo jeho zložky. Ak sa prejavia, prestaňte prípravok používať a obráťte sa na svojho lekára. Nie sú známe žiadne kontraindikácie a vedľajšie účinky v období tehotenstva a dojčenia. V každom prípade sa pred aplikáciou poraďte so svojím lekárom.

### BALENIE

5x gáza 10 cm x 10 cm.

BEZ LEPKU  
BEZ FARBÍV  
BEZ ALERGENOV



**EMPOLAS**

Vyhradný distribútor pre ČR a SR:

EMPOLAS s.r.o.

Česká republika

info@empolas.com www.ozonidy.sk



**ERBAGIL s.r.l.**

Via L. Settembrini, 13

82037 Telesse Terme (BN) Italy

www.erbagil.com

REV. 01 01/2023



CE 0425

