

RIGENOMA®

HYDROGEL

Inovace v lokální léčbě nekrotických a znečištěných kožních lézí.



OZOILE
UNIKÁTNÍ PATENT
Stabilní Ozonidy

RIGENOMA® HYDROGEL s OzoilE® je inovativní zdravotnický prostředek ve formě gelu na vodní bázi s pH 4,2, který podporuje přirozené čištění / debridement rány, včetně infikované, díky hyperhydrataci nekrotické tkáně. Změkčuje a absorbuje krusty a exsudát a zároveň podporuje granulaci zdravé spodní tkáně. Účinné spojení OzoilE® a kyseliny mléčné ve vodním gelu zajišťuje vlhké prostředí rány, usnadňuje autolytický debridement a čištění spodiny rány pokryté nekrózou, povlakem a odumřelými buňkami. Vytváří nepříznivé prostředí k množení mikrobů a podporuje obnovu a regeneraci tkáně.

HLAVNÍ SLOŽKY

Voda (ozonizovaná), OzoilE® (stabilní ozonidy s vitamínem E acetátem), kyselina mléčná.

INDIKACE

Ošetření nekrotické a znečištěné kožní léze. Pod lékařským dohledem může být RIGENOMA® hydrogel také použit na infikované rány.

JAK POUŽÍVAT

Po odstranění sekundárního krytí a vyčištění rány naneste vrstvu RIGENOMA® hydrogelu tak, aby pokryl celou ránu.

Aplikujte přípravek alespoň dvakrát až třikrát týdně. Četnost převazů a výměna krytí musí být úměrná stavu rány a její exsudace. Překryjte sekundárním krytím.

VAROVÁNÍ

Určeno k vnějšímu použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte, je-li je obal poškozený nebo po uplynutí data expirace. Datum spotřeby se vztahuje na neporušený a správně uskladněný produkt. V případě zasažení očí: několik minut důkladně vyplachujte vodou, pokud to lze, vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování. Uchovávejte na chladném a suchém místě, mimo zdroje tepla a přímého slunečního záření. Skladujte nejlépe mezi 5°C a 35°C. Před použitím zdravotnického prostředku si dobře umyjte ruce.

Po použití tubu pečlivě uzavřete. Spotřebujte nejlépe do 6 měsíců po prvním otevření.

RIGENOMA® hydrogel je dobře snášen. Nejsou známy případy vedlejších účinků či alergických reakcí. Nepoužívejte v případě zjištěné přecitlivělosti na přípravek nebo některé jeho složky. Pokud se projeví, přestaňte přípravek používat a obraťte se na svého lékaře. Nejsou známy žádné kontraindikace a vedlejší účinky v době těhotenství a kojení, v každém případě se doporučuje před aplikací poradit se s lékařem.

BALENÍ

Tuba 100 ml.

BEZ LEPKU
BEZ BARVIV
BEZ ALERGENŮ


Vyhradný distribútor pre ČR a SR:
EMPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@empolas.com www.ozonidy.sk

 ERBAGIL s.r.l.
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com

REV. 01 11/2022



RIGENOMA®

HYDROGÉL

Inovácia v lokálnej liečbe nekrotických a znečistených kožných lézií.



OZOIL E

UNIKÁTNÝ PATENT
Stabilné Ozonidy

RIGENOMA® HYDROGÉL s OzoilE® je inovatívny zdravotnícky prostriedok vo forme gélu na vodnej báze s pH 4,2, ktorý podporuje prirodzené čistenie / debridement rany, vrátane infikovanej, vďaka hyperhydratácii nekrotického tkaniva. Zmäkčuje a absorbuje krusty a exsudát a zároveň podporuje granuláciu zdravého spodného tkaniva. Účinné spojenie OzoilE® a kyseliny mliečnej vo vodnom géle zaisťuje vlhké prostredie rany, uľahčuje autolytický debridement a čistenie spodiny rany pokryté nekrózou, povlakom a odumretými bunkami. Vytvára nepriaznivé prostredie na množenie mikróbov a podporuje obnovu a regeneráciu tkaniva.

HLAVNÉ ZLOŽKY

Voda (ozonizovaná), OzoilE® (stabilné ozonidy s vitamínom E acetátom), kyselina mliečna.

INDIKÁCIE

Ošetrovanie nekrotické a znečistené kožné lézie. Pod lekárske dohľadom môže byť RIGENOMA® hydrogél tiež použitý na infikované rany.

AKO POUŽÍVAŤ

Po odstránení sekundárneho krytia a vyčistenia rany naneste vrstvu RIGENOMA® hydrogélú tak, aby pokryl celú ranu.

Aplikujte aspoň dvakrát až trikrát týždenne. Frekvencia prevázov a výmena krytia musí byť úmerná stavu rany a jej exsudácii. Prekryte sekundárnym krytím.

VAROVANIE

Určené na vonkajšie použitie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte, ak je obal poškodený alebo po uplynutí dátumu expirácie. Dátum spotreby sa vzťahuje na neporušený a správne uskladnený produkt. V prípade zasiahnutia očí: niekoľko minút dôkladne vyplachujte vodou, pokiaľ je to možné, vyberte kontaktné šošovky a pokračujte vo vyplachovaní. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste, mimo zdroja tepla a priameho slnečného žiarenia.

Skladujte najlepšie medzi 5 °C a 35 °C. Pred použitím zdravotníckej pomôcky si dobre umyte ruky.

Po použití tubu starostlivo uzavrite. Spotrebujte najlepšie do 6 mesiacov po prvom otvorení.

RIGENOMA® hydrogél je dobre znášaný. Nie sú známe prípady vedľajších účinkov či alergických reakcií. Nepoužívajte v prípade zistenej precitlivosti na prípravok alebo niektoré jeho zložky. Ak sa prejavia, prestaňte liek používať a obráťte sa na svojho lekára. Nie sú známe žiadne kontraindikácie a vedľajšie účinky v čase tehotenstva a dojčenia, v každom prípade sa odporúča pred aplikáciou poradiť sa s lekárom.

BALENIE

Tuba 100 ml

BEZ LEPKU
BEZ FARBÍV
BEZ ALERGÉNOV


Výhradný distributor pro ČR a SR:
EMIPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@empolas.com www.ozonidy.cz


ERBAGIL s.r.l.
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com

REV. 01 11/2022

