

RIGENOMA®

IMPREGNOVANÉ NEPŘILNAVÉ KRYTÍ



OZOILÉ

UNIKÁTNÍ PATENT

Stabilní Ozonidy

INDIKACE

RIGENOMA® impregnované nepřilnavé krytí je moderní krytí na rány určené k prevenci a ošetření akutních a chronických kožních lézí s rizikem infekce, jako jsou proleženiny, cévní vředy, metabolické vředy, operační rány a aktinické vředy.

HLAVNÍ SŁOŽKY

OzoilÉ® (stabilní ozonidy s acetátem vitamínu E), kyselina hyaluronová, aloe pravá, rozchodník lžičkolistý, černý rybíz, kyselina glycyrrhetinová, listnatec pichlavý, měsíček lékařský, kyselina alfa-lipoová.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Otevřete sáček, odstraňte ochrannou plastovou fólii, vyjměte krytí a aplikujte jednu nebo více kusů podle velikosti ošetřované oblasti. Překryjte sterilní gázou nebo vhodným obvazem dle potřeby. Převaz opakujte jednou denně nebo obden podle situace a pokynů lékaře.

V případě bandážování nebo okluzivního obvazu lze krytí vyměnit každé tři nebo čtyři dny podle pokynů lékaře. Celková doba léčby závisí na velikosti ošetřované oblasti a rychlosti odezvy na léčbu.

UPOZORNĚNÍ A POKYNY

K zevnímu lokálnímu použití. Nepožívejte. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Přípravek nepoužívejte po uplynutí data expirace. Nepoužívejte, je-li obal poškozený. Datum expirace se vztahuje na nedotčený a dokonale uchovaný přípravek. Skladujte v suchu mimo zdroje tepla a přímého slunečního záření. Krytí je jednorázové, to znamená, že ho lze použít pouze jednou pro jednoho pacienta. Opakované použití může způsobit vážné infekce.

KONTRAINDIKACE

Rigenoma® nepřilnavé krytí je dobře snášeno. Dosud nejsou známy žádné případy senzibilizace, ani případy vedlejších účinků. Pokud by nastaly, přerušete používání přípravku a obraťte se na svého lékaře.

INTERAKCE

Nejsou známy žádné interakce nebo nesnášenlivosti s jinými látkami.

BALENÍ

Krabička s 10 ks krytí.

Zdravotnický prostředek.
Sterilizováno zářením.

BEZ LEPKU
BEZ BARVIV
BEZ ALERGENŮ


Výhradní distributor pro ČR a SR:
EMPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@empolas.com www.ozonidy.cz


ERBAGIL s.r.l.
Via L. Settembrini, 13
82037 Telesse Terme (BN) Italy
www.erbagil.com

REV. 02 01/2023



RIGENOMA®

IMPREGNOVANÉ NEPRIĽNAVÉ KRYTIE



OZOILÉ

UNIKÁTNY PATENT

Stabilné Ozonidy

INDIKÁCIE

RIGENOMA® impregnované nepriľnavé krytie je moderné krytie na rany určené na prevenciu a ošetrovanie akútnych a chronických kožných lézií s rizikom infekcie, ako sú preležaniny, cievne vredy, metabolické vredy, operačné rany a aktinické vredy.

HLAVNÉ ZLOŽKY

OzoilÉ® (stabilné ozonidy s acetátom vitamínu E), kyselina hyaluronová, aloe pravá, rozchodník širokolistý, kyselina glycyrrhetínová, listnatec pichľavý, nechtík lekársky, kyselina alfa-lipoová.

SPÔSOB POUŽITIA

Otvorte vrečko, odstráňte ochrannú plastovú fóliu, vyberte krytie a naneste jednu alebo viac kusov podľa veľkosti ošetrovanej oblasti. Prekryte sterilnou gázou alebo vhodným obvazom podľa potreby. Prevaz opakujte raz denne alebo obdeň podľa situácie a pokynov lekára. V prípade bandážovania alebo okluzívneho obväzu možno krytie vymeniť každé tri alebo štyri dni podľa pokynov lekára. Celková dĺžka liečby závisí od veľkosti ošetrovanej oblasti a rýchlosti odzvy na liečbu.

UPOZORNENIE A POKYNY

Na vonkajšie lokálne použitie. Nepožívajte. Uchovávať mimo dosahu detí. Nepoužívajte po dátume expirácie. Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Dátum expirácie sa vzťahuje na nedotknutý a dokonale uchovaný prípravok. Skladujte v suchu mimo zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia. Krytie je jednorázové, to znamená, že ho možno použiť len raz pre jedného pacienta. Opakované použitie môže spôsobiť vážne infekcie.

KONTRAINDIKÁCIE

Rigenoma® impregnované nepriľnavé krytie je dobre znášané. Zatiaľ nie sú známe žiadne prípady senzibilizácie, ani prípady vedľajších účinkov. Ak sa vyskytnú, prerušte používanie prípravku a obráťte sa na svojho lekára.

INTERAKCIE

Nie sú známe žiadne interakcie alebo intolerancie s inými látkami.

BALENIE

Krabička s 10 ks krytia.

Zdravotnícka pomôcka.
Sterilizované žiarením.

BEZ LEPKU
BEZ FARBIV
BEZ ALERGÉNOV


Vyhradný distribútor pre ČR a SR:
EMPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@empolas.com www.ozonidy.sk


ERBAGIL s.r.l.
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com

REV. 02 01/2023



STERILE R