



## Prstová ortéza 030



HANDICAP

Název zdravotnického prostředku

### Prstová ortéza 030

#### URČENÝ ÚČEL

Prstová ortéza 030 je určena k fixaci prstů (2.-4. prst) ruky při pooperačních a porázových stavech v oblasti 2.-4. prstu.

#### VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Slouží k fixaci 2.-4. prstu ruky pomocí dlahy, kterou lze vytvářet dle potřeby pacienta a stáhnout pomocí suchého zipu.

#### INDIKACE

- Poranění 2.-4. prstu ruky.
- Doléčení po operaci v oblasti prstů ruky.

#### KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

#### ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

#### MATERIÁL

Polyuretan (PUR) 60%, polyamid (PAD) 20%, bavlna 15%, polyester (PES) 5%.

#### CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.

#### UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

#### LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



Zdravotnický prostředek (MD) je určen pro jednoho pacienta. Skladujte na suchém místě, chráněném před přímým slunečním zářením.




Handicap, a. s.  
Benešov 71, 679 53  
Czech Republic

Datum poslední revize: 1.2. 2020

Závazné nežádoucí příhody, definované ve Člennku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.


## POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

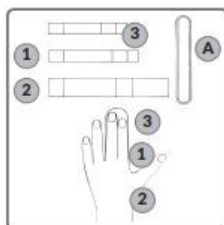

**1**

Sundejte všechny pásky a přiložte dlahu pod postižený prst – duralová dlahu může být tvarována dle potřeby odborným personálem.

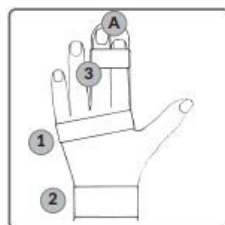

**2**

Postupně připeňte pásky (na stranu s počesaným materiálem) v pořadí dle obrázku 2 na díl A. Po nasazení zkontrolujte správnou pozici a dotažení pásku.

Před praním zapněte suché zipy a vyjměte fixační dlahu.  
Výrobek perle nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.  
Výrobek pečlivě vymáčkejte, zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



## HANDICAP, A. S.

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR  
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK  
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,  
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.

